



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE PULITRICE

EPM1



EUROCEM s.r.l. – Via Darwin, 20 – 20019 Settimo Milanese (MI) – Italy
Tel. 02 33503261 / 02 3287849 - Fax 02 33503261 – E-mail: info@eurocemitalia.com
Registro Imprese MI/P.I./C.F. 12587090155- R.E.A. Milano 1570037
Registro Produttori AEE IT08020000000625

1.SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale è stato redatto dal costruttore ed è parte integrante del corredo della macchina. Prima di installare e di utilizzare l'apparecchio devono essere state lette attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Il manuale deve essere conservato per riferimenti futuri.

2. USO PREVISTO

Apparecchio da laboratorio odontotecnico, per la lucidatura meccanica mediante paste abrasive e/o brillantanti e strumenti rotanti.

3. INSTALLAZIONE

3.1. Verificare che l'apparecchio non abbia subito danni evidenti durante il trasporto.

3.2. Posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale stabile con un'altezza di circa 70 cm., di dimensioni idonee e lontano da fonti di calore e da spruzzi d'acqua. Prevedere uno spazio sufficiente attorno alla macchina al fine di assicurare una corretta ventilazione.

3.3. Inserire i due puntali (destro-sinistro) nei terminali degli alberini.. Inserire il puntale con indicato S nel terminale di sinistra e il puntale con indicato D nel terminale di destra.

3.4. Prima dell'installazione assicurarsi che la rete di alimentazione sia conforme ai dati di targa (230 Vac - 50 Hz.) e che la linea sia protetta da un interruttore magneto termico differenziale. Verificare inoltre gli assorbimenti e le potenze installate. Se non si è sicuri del tipo di energia disponibile consultare la Società' per l' energia elettrica.

3.5. Assicurarsi che l'interruttore generale si trovi sulla posizione spenta (0), quindi collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente. Assicurarsi che l'impianto elettrico di alimentazione disponga del circuito di terra di protezione.

4.FUNZIONAMENTO

Avviare la pulitrice tramite l'interruttore generale posto sulla base della macchina portandolo sulla posizione accesa (I).

Agire sul commutatore per selezionare la velocità desiderata:

- Velocità 1: 1400 giri/min.
- Velocità 2: 2800 giri/min.

5. DATI TECNICI

Dimensioni d'ingombro: cm 34 L. x 20 P. x 25 H.

Peso: Kg. 12

Tensione d'alimentazione: 230 Vac - 50 Hz

Potenza: watt 500

6. AVVERTENZE

- **Non avvicinarsi alla macchina con materiale e/o con componenti che si possano impigliare. Qualora non venga rispettata questa norma permane il rischio residuo di impigliamento.**
- Non usare mai benzina, solventi o altro fluidi infiammabili per la pulizia del particolare, usare solventi commerciali omologati e che siano ininfiammabili e atossici. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate con l'interruttore generale in posizione spenta (0) e con il cavo di alimentazione scollegato. Prima di utilizzare qualsiasi metodo di pulizia, fatta eccezione, di quelli raccomandati dal costruttore, gli utenti devono contattare il costruttore per verificare con questi che il metodo proposto non rischia di danneggiare l'apparecchio.
- Non usare le mani per individuare le perdite di pressione e/o potenza della macchina.
- Non appoggiare alcun oggetto sui cavi di alimentazione e non posizionare i cavi in luoghi in cui possano essere calpestati
- In caso di prolungata inattività scollegare i cavi di alimentazione.
- Per eventuali trasporti usare sempre l'imballo originale.

7. MANUTENZIONE ORDINARIA

La pulitrice non necessita di particolare manutenzione.

8. ISTRUZIONI PER LA DEMOLIZIONE




Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Procedere allo smaltimento come indicato da normativa vigente

9. INFORMAZIONI IMPORTANTI

- L'apparecchio è fornito di sistemi di sicurezza che non dovranno mai essere rimossi e/o modificati.
- La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per qualsiasi apparecchio installato, utilizzato, modificato, riparato e/o manomesso da personale non competente e non autorizzato.
- L'apparecchio è stato progettato e costruito soltanto per gli scopi previsti, conseguentemente la Ditta Costruttrice si esime da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali, cose e all'apparecchio stesso causati da un utilizzo improprio dell'apparecchiatura.

Un uso improprio dell'apparecchiatura può compromettere la sicurezza!

- Sottoporre annualmente l'apparecchio ad una revisione completa da parte del Costruttore.
- Per qualsiasi chiarimento e/o spiegazione tecnica rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

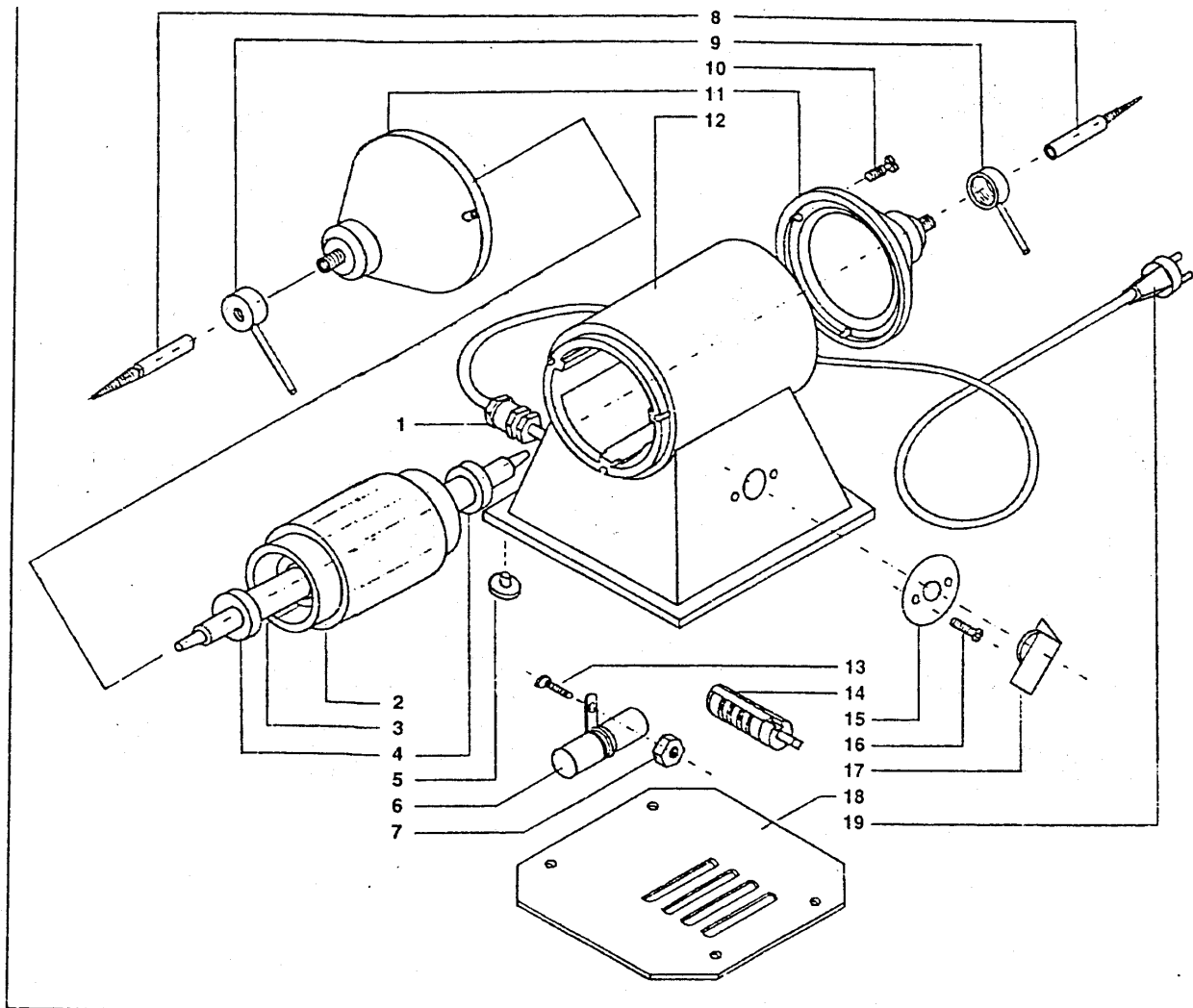

| Rif. | Denominazione | Denomination | Denomination | Bezeichnung | Denominación |
|------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Passacavo | Cable lead | Passe-câble | Kabeldurchgang | Guía del cable |
| 2 | Boccola | Bush | Douille | Buchse | Casquillo |
| 3 | Rotore | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor |
| 4 | Cuscinetto | Bearing | Roulement | Lager | Cojinete |
| 5 | Piede | Foot | Pied | Fuß | Pie |
| 6 | Condensatore | Condenser | Condensateur | Kondensator | Condensador |
| 7 | Dado | Nut | Ecrou | Mutter | Tuerca |
| 8 | Puntale dx/sx | Right/Left point | Pointe droite/gauche | Druckstück rechts/links | Clavija derecha/izquierda |
| 9 | Sblocco puntale | Point release | Deblocage pointe | Freigabe Druckstück | Desbloqueo de la clavija |
| 10 | Vite | Screw | Vis | Schraube | Tornillo |
| 11 | Scudo | Shield | Bouclier | Schutzschild | Pantalla |
| 12 | Corpo | Body | Corps | Rumpf | Cuerpo |
| 13 | Vite | Screw | Vis | Schraube | Tornillo |
| 14 | Interruttore | Switch | Interrupteur | Schalter | Interruptor |
| 15 | Rondella | Washer | Rondelle | Scheibe | Arandela |
| 16 | Vite | Screw | Vis | Schraube | Tornillo |
| 17 | Leva | Lever | Levier | Hebel | Palanca |
| 18 | Coperchio | Cover | Couvercle | Deckel | Tapadera |
| 19 | Spina | Plug | Fiche | Stecker | Enchufe |