

Osmo Steril Mono

Il Genio dell'igiene Globale per l'acqua del riunito odontoiatrico




WI-FI

È l'apparecchiatura **brevettata e prodotta in Italia** per il trattamento e la disinfezione dell'acqua del riunito odontoiatrico. Alimenta in modo completamente automatico e senza l'ausilio dell'operatore il riunito odontoiatrico. È adatta ai singoli riuniti di qualsiasi età e marca e non necessita di una rete idrica dedicata.

Come funziona?

1. FILTRA L'ACQUA IN ARRIVO DALLA RETE IDRICA CON IL SISTEMA DELL'OSMOSI INVERSA (producendo acqua osmotizzata pura, priva di batteri, virus, calcare, metalli pesanti e altri potenziali inquinanti).
2. LA DISINFETTA IN CONTINUO CON IL BLOSSIDO DI CLORO (il disinfettante più efficace riconosciuto scientificamente, virucida, battericida, fungicida, in grado di penetrare il biofilm e dissolverlo).

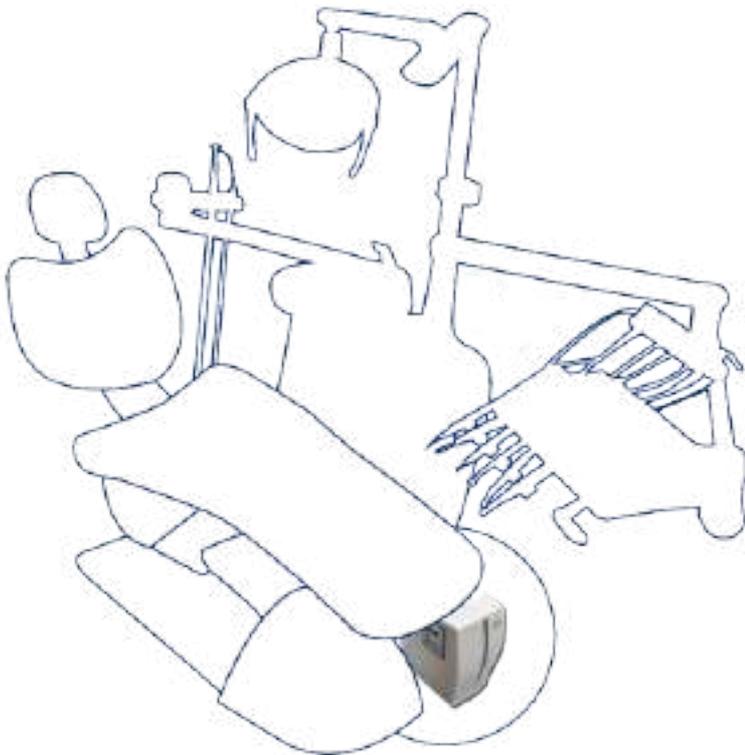

STOP LEGIONELLA
STOP BIOFILM
STOP CALCARE
STOP INFEZIONI CROCIATE

**DISCRETO,
COMPATTO E
SILENZIOSO**

Benefici

- **LA DISINFEZIONE È OPERATOR FREE:** occorre solo ripristinare il Biossido di Cloro ogni 30 giorni.
- **SICUREZZA E RISPARMIO:** utilizza il miglior disinfettante al minor costo.
- **FAVORISCE UNA GUARIGIONE PIÙ RAPIDA** dei pazienti sottoposti ad interventi odontoiatrici.
- **EVITA PROBLEMI E COSTI LEGALI** per malattie da infezioni crociate imputabili all'acqua.
- **TAGLIA I COSTI DELL'ASSISTENZA TECNICA:** elimina e previene le ostruzioni dovute dal calcare a manipoli, siringhe e turbine.
- **Manutenzione annuale** - Necessita del cambio filtri una volta all'anno (in base all'utilizzo).
- **Connettività WI-FI - Osmo steril** è dotato di una scheda WI-FI integrata che permette di monitorare da PC, smartphone o tablet il dispositivo. Tramite questa funzione è possibile verificare i parametri dell'apparecchiatura, resettare i contatori e scaricare i report di **Osmo Steril Mono**.



Perché usare Osmo Steril?

- Per contrastare e rimuovere il **biofilm** dai circuiti idrici dei riuniti, causa di infezioni crociate e contaminazioni della rete idrica.
- Per ridurre i pericoli **dell'aerosol** generato dagli strumenti rotanti, durante la pratica odontoiatrica, per pazienti e operatori.
- Per eliminare i problemi dovuti al **calcare**, preservando il riunito e allungando la vita degli strumenti rotanti.

DIMENSIONI OSMO STERIL MONO

Altezza	cm	43
Larghezza	cm	24
Profondità	cm	42
Peso	kg	06

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V-HZ	230 - 50/60
Potenza assorbita	W	25
Pressione di lavoro max.	bar- kPa	10 - 1000
Pressione min. acqua di rete	bar- kPa	2,5 - 250
Portata min. acqua di rete	l/h	250
Produzione media a 25°	l/h	12
Campo dosaggio ClO ₂ (min. - max.)	mg/l	0,2 - 1,0

CODICI

AFM OSM

Dispositivo **Osmo Steril Mono**

K MANM

Kit manutenzione **Osmo Steril Mono** fino a Ottobre 2021

K MANM 2

Kit manutenzione **Osmo Steril Mono** da Novembre 2021

BIOXTERIL P 100ml

Disinfettante - Biossido di cloro stabilizzato



K MANM



K MANM 2